



Перед использованием данного изделия, внимательно прочитайте указания в прилагаемой инструкции по применению и следуйте ее рекомендациям. Уделите особое внимание соблюдению указаний по технике безопасности.

#### Описание изделия

Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder применяется для поддесневой обработки, в том числе, при лечении пародонтита и периимплантита.

Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder предназначен для использования в стандартных аппаратах для воздушно-абразивной обработки. При эксплуатации аппарата соблюдайте соответствующее руководство.

Сохраняйте эту инструкцию по применению в течение всего срока эксплуатации изделия.

#### Применения

Данный порошок устраняет поддесневую биопленку и рекомендуется для следующих методов очистки:

- Устранение пародонтальной биопленки.
- Сохранение имплантатов (включая титановое покрытие).
- Для дальнейшего лечения после первого применения в пародонтальной терапии.



Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder не применяют для удаления конкрементов и зубного камня.

#### Указания по обработке


При обработке плоских пародонтальных карманов (глубиной до 5 мм) опрыскивайте каждую сторону зуба в течение макс. 5 секунд на один карман.



Не направляйте струю в одну точку, совершайте вращательные движения, чтобы обеспечить равномерную очистку.



Угол наклона кончика наконечника бормашины по отношению к зубу должен составлять от 30° до 60°. Чем острее угол, тем глубже в карман будет попадать порошок.

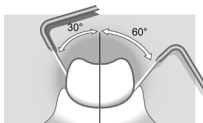

#### Противопоказания



Ни в коем случае не проводите воздушно-абразивную обработку зубов у пациентов, страдающих хроническим бронхитом или астмой! Струя из воздуха и порошка может вызвать респираторные проблемы.



Некоторые пациенты могут быть очень чувствительны к глицину. При возникновении аллергической реакции остановите обработку с применением изделия и полностью удалите порошок из ротовой полости пациента.



Обработка глубоких пародонтальных карманов может вызвать бактериемию. Соблюдайте необходимые ограничения при лечении пациентов, находящихся в зоне риска (прежде всего, пациентов с ослабленным иммунитетом, эндокардитом).



Не направляйте струю на пломбы, коронки или мосты, так как порошок может повредить реставрации.

#### Указания по обработке



Пациент и лечащий врач должны надеть защитные очки.



Лечащему врачу необходимо надеть маску для рта и перчатки.



Используйте большую отсасывающую канюлю Вашей стоматологической установки.



Смажьте губы пациента вазелином.



После применения глицинового порошка помойте руки.



После применения глицинового порошка очистите лицо пациента (например, влажной тряпочкой).

#### Общая информация

- Не наполняйте емкость порошком выше максимальной отметки.
- Данный порошок не содержит сахара.

#### Хранение и стабильность свойств



Температура хранения: от -10 до +25 °C (от 14 до +77 °F)

Температура транспортировки: от -10 до +60 °C (от 14 до +140 °F)



Защитите от воздействия влаги.



Относительная влажность воздуха: 5–95 % без образования конденсата.



Атмосферное давление: 700–1060 гПа (10–15 psi).



Не используйте порошок по истечении срока годности.

#### Символы



Знак ГОСТ.



Соблюдайте руководство по эксплуатации.



Пригоден для вторичного использования.



Маркировка CE (Communauté Européenne). Изделие с этой маркировкой отвечает требованиям соответствующей директивы ЕС.



Изготовитель.



Дата изготовления.



Серийная партия изделий.



Количество.



Не использовать повторно — изделие пригодно для одноразового применения



Перед использованием встряхните упаковку с порошком KaVo PROPHYflex Perio Powder.

- Не храните порошок вблизи источников тепла.
- Храните при температуре от -10 до 25 °C и относительной влажности воздуха 10–95 %.
- Перед использованием встряхните упаковку с порошком
- После использования закройте емкость с порошком крышкой
- Порошок годен в течение 2 лет. Не используйте по истечении срока годности.

#### Для поддесневой обработки также доступны:

- Порошок PROPHYflex Pulver® с ароматом апельсина (номер в каталоге 1.007.0014), ягод (номер в каталоге 1.007.0015), вишни (номер в каталоге 1.007.0016) и мяты (номер в каталоге 1.007.0017).
- Порошок PROPHYpearls® (номер в каталоге 1.002.0342)