

A01

Бандаж абдоминальный Тупор 9"/23 см – это научно разработанный эластичный бандаж, обеспечивающий целенаправленную компрессию брюшных мышц. Он отлично подходит для использования в период восстановления после операций и помогает уменьшить объем талии после родов. Благодаря изящному дизайну бандаж можно носить даже под одеждой.

КОНСТРУКЦИЯ

Изделие изготовлено из высококачественного моноволоконного эластичного материала, содержащего термостойкую резину с высоким модулем упругости, что гарантирует прочность и долговечность. Застежки-липучки позволяют быстро и легко надеть и снять изделие, а также индивидуально регулировать посадку по талии. Гибкие вставки предотвращают образование складок и скручивание бандажа. Мягкий пеноматериал создает дополнительный комфорт для пользователя.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Защита послеоперационных швов
- Для снижения объема талии после родов
- Растяжение мышц
- Послеоперационная поддержка мышц грудной клетки и брюшной полости
- Утягивающий бандаж для живота
- Ослабленные мышцы брюшного пресса
- Пупочная и вентральная грыжи
- Поддержка после гистерэктомии
- Поддержка при диастазе прямых мышц живота

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный корпус обеспечивает сильную, но комфортную компрессию.
- Моноволокнистая эластичная ткань обеспечивает высокую воздухопроницаемость и комфорт для пациента.
- Гибкие вставки предотвращают скручивание бандажа.
- Широкие панели с застежками-липучками гарантируют плотную и надежную посадку.
- Петля для руки облегчает надевание изделия.
- Изделие достаточно тонкое, что позволяет носить его под одеждой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Высокий уровень комфорта
- Плотная и надежная посадка
- Гибкие вставки
- Дышащая ткань
- Элегантный дизайн
- Петля для руки
- Легкость в использовании
- Приятный внешний вид

СОСТАВ

Полиэстер, Резина, Полиуретан, Полиамид, Полиацеталь

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки. Убедитесь, что метка «UP» (верх) соответствует правильному положению изделия.
2. Оберните бандаж вокруг талии, удерживая его в вертикальном положении и правильно располагая на теле.
3. Центральная вставка бандажа должна быть выровнена по линии позвоночника. Нижний край бандажа должен совпадать с основанием позвоночника.
4. Закрепите застежки-липучки на необходимой, но комфортной степени компрессии с помощью петли для руки.

**Уполномоченный представитель
производителя в Республике Беларусь:**

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India