

### **Корсет для пояснично-крестцового отдела Black**

Корсет для пояснично-крестцового отдела создан с использованием гибких шин на задней панели, что обеспечивает комфортную поддержку спины и способствует облегчению боли в поясничной области. Корсет можно использовать в повседневной жизни и в качестве профилактического средства. Отличный внешний вид изделия позволяет носить его в любых условиях.

### **КОНСТРУКЦИЯ**

Корсет для пояснично-крестцового отдела изготовлен из высококачественной эластичной ткани с моноволоконной структурой, содержащей термостойкую резину с высоким модулем упругости, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Застежки-липучки позволяют индивидуально подгонять корсет по фигуре, обеспечивая легкость надевания и снятия. Эстетичные фиксаторы на концах липучек обеспечивают удобный захват.

Мягкая вспененная подкладка на задней панели создает комфорт при использовании. Полипропиленовая вставка в центре и гибкие нейлоновые шины по бокам задней панели адаптируются к форме поясничной области, обеспечивая необходимую фиксацию.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- Незначительный спондилёз
- Начальная стадия остеохондроза, спондилоартрит
- Протрузии
- Хронические боли в пояснице, усталость от статического напряжения, постуральные деформации и механические нагрузки из-за неправильной осанки
- Боли в поясничном отделе, вызванные остеопорозом
- Обеспечение комфорта при длительной работе и путешествиях
- Послеоперационная реабилитация (после операций на межпозвоночных дисках, поясничного спондилодеза), надежная фиксация переломов
- Стабилизация при переломах и травмах позвонков
- Временная иммобилизация пострадавших в авариях во время извлечения и транспортировки
- Эффективен при болях в пояснице в повседневной жизни

### **ОСОБЕННОСТИ**

- Гибкие шины на задней панели адаптируются к форме поясницы, обеспечивая оптимальную иммобилизацию
- Мягкая подкладка на задней панели гарантирует комфорт
- Высокопористая эластичная ткань с моноволоконной структурой обеспечивает сильную компрессию и хорошую воздухопроницаемость
- Механизм двойного натяжения обеспечивает дополнительную компрессию
- Широкие панели с застежками-липучками упрощают надевание и обеспечивают гибкость в подборе размера

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Основание пояса должно совпадать с крестцом на уровне второго крестцового позвонка (S2).
- Центр задней панели должен располагаться по центру позвоночного столба.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Комфортные гибкие шины для поддержки спины
- Хорошо вентилируемый пористый материал
- Удобная фиксация для повседневного использования
- Механизм двойного натяжения
- Широкая панель с застежками-липучками

## **СОСТАВ**

Полиамид, Спандекс, Полиэстер, Эластичный Полиэтилен, Полиацеталь, Полуретан, Термопластичный эластомер, Полипропилен

## **ИНСТРУКЦИИ**

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
  - Нарушение чувствительности
  - Нарушение кровообращения
  - Аллергическая реакция или зуд
  - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

## **УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

## **КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

1. Расстегните застежки-липучки.
2. Оберните корсет вокруг талии, удерживая его в правильном положении (ориентируйтесь на ярлык "UP/inside"). Разместите заднюю панель по центру позвоночного столба так, чтобы нижний край пояса совпадал с крестцом на уровне второго крестцового позвонка (S2).
3. Застегните застежки-липучки, обеспечив комфортную степень компрессии. Потяните и закрепите эластичные ремни двойного натяжения для дополнительной фиксации и стабильности шины.

**Уполномоченный представитель  
производителя в Республике Беларусь:**

ЧТУП «Нэйчерал Блис»  
Улица Немига ,40, офис 25/3  
220004 г.Минск  
Республика Беларусь

info@dinamed.by

**Производитель:**

Tynor Orthotics Private Limited  
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial  
Area, Mohali-160055, Punjab, India

**Производственная площадка:**

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS  
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India