

Корсет контурный для поддержки пояснично-крестцового отдела

Корсет контурный для поддержки пояснично-крестцового отдела Tynor — это научно разработанный пояс с четырьмя контурными жесткими шинами в задней панели, обеспечивающий надежную фиксацию и поддержку нижней части спины. Жесткие шины можно извлекать и настраивать в соответствии с желаемой формой.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет контурный для поддержки пояснично-крестцового отдела изготовлен из высококачественного монофиламентного эластичного материала. В состав входит термостойкая резина с высоким модулем упругости, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Четыре контурные алюминиевые шины интегрированы в заднюю панель, обеспечивая правильную форму и оптимальную поддержку пояснично-крестцовой области.

Задняя панель изготовлена из пеноматериала, что гарантирует комфортную поддержку. Застежки на липучках обеспечивают индивидуальную посадку по талии, а также быстрый и удобный процесс надевания и снятия. Механизм двойной затяжки усиливает компрессию и обеспечивает надежную фиксацию пояснично-крестцовой области.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поясничный спондилит.
- Синдром межпозвоночного диска.
- Реабилитация после дискэктомии.
- Боли в поясничном отделе позвоночника, вызванные остеопорозом.
- Боли в нижней части спины.
- Постуральные деформации и механические нагрузки из-за неправильной осанки.
- Комфорт при длительных рабочих нагрузках и во время путешествий.
- Стабилизация при переломах и травмах позвоночника.
- Дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника.

ОСОБЕННОСТИ

- Анатомический дизайн для более плотной и комфортной посадки.
- Жесткие шины обеспечивают надежную фиксацию и поддержку.
- Высокопористый эластичный материал улучшает вентиляцию и воздухопроницаемость.
- Механизм двойной затяжки усиливает компрессию.
- Увеличенная липучка гарантирует идеальную посадку и гибкость в выборе размера.
- Прочный материал обеспечивает долговечность и продолжительный срок службы изделия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Контурный корсет для поддержки пояснично-крестцового отдела должен быть индивидуально адаптирован для пациента обученным ортопедическим техником, чтобы обеспечить максимальную фиксацию и комфорт при ношении.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная фиксация.
- Анатомические контурные шины.
- Индивидуальная настройка.
- Высокопористый материал, обеспечивающий исключительный комфорт.
- Двойной механизм затяжки для дополнительной поддержки.
- Длинная липучка для надежной фиксации и комфортного использования.

СОСТАВ

Алюминий, полиэстер, Etha foam, Полиамид, Каучук.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят при одновременном использовании с другим медицинским устройством
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Извлеките алюминиевые шины из их карманов.
2. Придайте шинам необходимую форму, чтобы они соответствовали анатомическим особенностям пользователя.
3. Вставьте настроенные шины обратно в их карманы.
4. Проверьте маркировку «UP/inside» для правильного расположения. Оберните пояс вокруг талии, следя за тем, чтобы он находился в вертикальном положении.
5. Задняя панель должна располагаться по центру позвоночного столба. Нижний край пояса должен совпадать с краем позвоночника.
6. Застегните липучки для комфортной компрессии. Потяните и зафиксируйте механизм двойной затяжки для дополнительной компрессии и устойчивости шин.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India