

Бандаж рёберный Тупор

Бандаж рёберный Тупор - это эластичный поддерживающий пояс для грудной клетки и верхней области живота, который создает компрессию и фиксирует ребра при переломах и в послеоперационный период. Он предотвращает движения в области груди и уменьшает дискомфорт, вызванный переломами ребер или растяжением мышц груди.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж реберный изготовлен из высококачественного монофиламентного эластика, содержащего термостойкий каучук с высокой упругостью, что обеспечивает долговечность изделия.

Дополнительная длинная панель с липучкой обеспечивает контролируемую компрессию, гибкость в размерном отношении и быстрое и легкое надевание и снятие изделия. Мягкая подушка из полимерной пены обеспечивает сильную локализованную поддержку на месте перелома.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Переломы и вывихи ребер.
- Уход после кардиоторакальной операции.
- Для защиты и фиксации послеоперационных швов живота и груди.
- Для уменьшения дискомфорта от внезапного расширения грудной клетки при глубоких вдохах, кашле или чихании во время восстановления.
- Для облегчения процесса выведения мокроты из легких после операции.

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичная конструкция создает сильную, но комфортную компрессию.
- Монофиламентный эластик обеспечивает высокую аэрацию и комфорт для пациента.
- Подушка для локализованной поддержки.
- Полужесткие шины предотвращают скручивание бандажа.
- Длинные панели с застежкой-липучкой обеспечивают удобство надевания и гибкость в подборе размера.
- Оптимальная ширина обеспечивает широкое покрытие области перелома и эффективную иммобилизацию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Компрессию можно настроить индивидуально для обеспечения оптимальной фиксации и комфортного дыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изделие высокопористое, очень комфортное в использовании.
- Эффективная компрессия для быстрого заживления.
- Дополнительная подушка обеспечивает фиксацию и поддержку.
- Легкость в использовании и гибкость при подборе размера.
- Широкое покрытие области перелома.

СОСТАВ

Полиэстер, Полиамид, Спандекс, Полиацеталь.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят при одновременном использовании с другим медицинским устройством
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежку-липучку перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Ослабьте липучки. Проверьте чтобы внутренний ярлык находился с внутренней стороны для правильного расположения.
2. Специальную компрессионную подушку разместите на месте перелома ребра.
3. Оберните бандаж вокруг грудной клетки или верхней части живота, удерживая его вертикально.
4. Закрепите застежку-липучку для удобной фиксации.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India