

Бандаж на грудную клетку

Бандаж на грудную клетку Тупор научно разработан и оснащен тремя регулируемыми съемными подушками, которые обеспечивают поддержку и способствуют комфортному заживлению после операций на грудной клетке. Он применяется для компрессии и фиксации реберного каркаса. Эластичность материала позволяет обеспечить достаточную гибкость и воздухопроницаемость.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж на грудную клетку Тупор изготовлен из высококачественного эластичного материала с термостойкой резиной, что обеспечивает его долговечность. Широкая застежка с крючками и петлями позволяет индивидуально подогнать и адаптировать бандаж вокруг груди, а также упрощает его надевание и снятие. Три мягкие регулируемые съемные подушки для груди обеспечивают эффективную компрессию и фиксацию реберного каркаса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Защита и фиксация хирургических швов на груди.
- Фиксация переломов грудины.
- Реабилитация после кардиоторакальных операций.
- Облегчение процесса отхождения мокроты из легких после хирургических вмешательств.
- Реабилитация после стернотомии.

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный корпус обеспечивает сильную компрессию.
- Центральная подушка уменьшает вибрацию и болевые ощущения.
- Боковые подушки способствуют более быстрому заживлению.
- Широкие панели с липучками обеспечивают плотную фиксацию, гибкость в выборе размера и легкость в носке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Более крупная подушка должна быть размещена в центре груди, в то время как другие две подушки следует разместить на правой и левой передней аксиллярной линии.
- Подушки на груди могут быть сняты или использованы по мере необходимости пациента либо по рекомендации врача. Их можно перемещать для максимального комфорта или для уменьшения болевых ощущений.
- Компрессия может быть настроена индивидуально для обеспечения высокого уровня фиксации и облегчения боли.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегчение боли и быстрая реабилитация.
- Контролируемая компрессия.
- Комфортное фиксирование грудины.
- Простота в ношении.

СОСТАВ

Полиэстер, Полипропилен, Каучук, Полиуретан

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки. Убедитесь, что изделие надето правильно, проверив внутреннюю метку UP.
2. Расположите более крупную грудную подушку в центре грудины.
3. Оберните изделие вокруг груди, чтобы другие две подушки оказались на передней боковой линии подмышек по аксиллярной линии в правильном положении.
4. Закрепите липучки для достижения оптимальной компрессии, обеспечивающей поддержку и комфорт.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India