

Корректор осанки

Корректор осанки Тупог разработан для исправления и поддержания здоровой осанки. Он помогает снять напряжение в верхней части спины, улучшая осанку за счёт мягкого выведения плеч назад и выравнивания позвоночника. Стильный дизайн делает его удобным для ношения под одеждой.

КОНСТРУКЦИЯ

Корректор осанки Тупог изготовлен из высококачественного, стойкого к износу полиэстрового материала, имеющего высокую эластичность и прочность при растяжении. Плечевые ремни выполнены из высокоплотного вспененного полиуретана, обеспечивающего комфортную поддержку. Эластичный пояс с застежками-липучками обеспечивает надежную фиксацию изделия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Коррекция осанки
- Поддержка ключиц
- Облегчение болезненных ощущение в области шеи и плеч
- Проблема наклона головы вперед
- Скругленные плечи
-

ОСОБЕННОСТИ

- Научный подход к коррекции осанки
- LDPE-полотно обеспечивает жесткую поддержку верхней части позвоночника
- Плечевые подушки обеспечивают комфортное ношение на протяжении длительного времени
- Эластичный пояс для индивидуальной коррекции
- Толстые закругленные края не врезаются в кожу
- Стильный дизайн – подходит для ношения под одеждой
- Застежки-липучки для надежной фиксации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Коррекция осанки
- Индивидуальная поддержка
- Улучшает уверенность
- LDPE полотно
- Плечевые подушки
- Эластичный пояс
- Стильный дизайн
- Застежки-липучки

СОСТАВ

Полиэстер, Вспененный Полиуретан, Полиэтилен, Полиамид

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки.
2. Прикрепите плечевые ремни к петлевому материалу с необходимой коррекционной силой.
3. Вставьте обе руки поочередно через плечевые ремни, как при надевании рюкзака.
4. Убедитесь, что подушки плечевые находятся в зоне подмышек.
5. Потяните и зафиксируйте эластичный пояс согласно необходимой коррекционной силе.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India