

Бандаж поддерживающий для спины

Бандаж поддерживающий для спины Tynor разработан для эффективной компрессии и поддержки нижней части спины. Это изделие минимизирует нагрузку на мышцы, связки и суставы нижней части спины, предотвращая травмы. Четыре гибких шины (по две с каждой стороны) обеспечивают оптимальную поддержку и мягкую иммобилизацию. Дополнительная подушка на спине обеспечивает комфортное амортизирующее воздействие.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготовлен из высококачественного монофиламентного эластичного материала и термостойкой резины с высокой эластичностью, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Полужёсткие шины на спине обеспечивают мягкую иммобилизацию и поддержку нижней части спины. Подушка на спине EVA обеспечивает комфортную амортизацию в нижней части спины. Сетчатая ткань на боковых частях обеспечивает высокую воздухопроницаемость, в то время как антискользящий материал обеспечивает прочное сцепление и фиксацию. Механизм двойной затяжки усиливает компрессию и создает надёжный захват.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Боль в пояснице
- Усталость из-за неправильной осанки
- Механическое напряжение из-за плохой осанки
- Поясничный спондилит
- Межпозвонковая грыжа
- Боль в пояснице, вызванная остеопорозом
- Комфорт при длительных рабочих часах и путешествиях
- Дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника
- Повреждение связок

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный корпус обеспечивает сильную компрессию.
- Полужёсткие шины создают оптимальную поддержку и иммобилизацию.
- Подушка на спине обеспечивает комфортное амортизирующее воздействие.
- Воздухопроницаемая ткань обеспечивает лёгкое прохождение воздуха.
- Механизм двойной затяжки для дополнительной компрессии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Более крупная подушка должна быть размещена в центре груди, в то время как другие две подушки следует разместить на правой и левой передней аксиллярной линии.
- Подушки на груди могут быть сняты или использованы по мере необходимости пациента либо по рекомендации врача. Их можно перемещать для максимального комфорта или для уменьшения болевых ощущений.
- Компрессия может быть настроена индивидуально для обеспечения высокого уровня фиксации и облегчения боли.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компрессия и поддержка
- Комфортная подушка на спине
- Воздухопроницаемость
- Механизм двойной затяжки
- Приятный внешний вид

СОСТАВ

Полиэстер, Каучук, Нейлон, Полиуретан, Делрин

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжку-липучку бандажа. Проверьте метку "UP" (верх) и оберните бандаж вокруг талии, удерживая его вертикально.
2. Убедитесь, что дополнительная подушка находится в центре спины.
3. Закрепите застёжки-липучки для комфортной компрессии. Растяните и закрепите двойные эластичные подтяжки для дополнительной фиксации и компрессии.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India