

B07

Воротник шейный Soft фиксирующий

Воротники шейные Soft фиксирующий Tynor предназначены для поддержки, стабилизации или иммобилизации шеи. Они защищают шею и голову от резких движений и вибраций, предотвращая ненужные движения шеи и головы. Разные варианты рекомендуются в зависимости от необходимого уровня поддержки и иммобилизации шейного отдела.

КОНСТРУКЦИЯ

Воротники изготовлены из прочного PU-пены. Модель B07 использует PU-пену средней плотности, в то время как модель B02 оснащена PU-пенкой высокой плотности. Модель B02 также включает армированный лист LDPE с закругленными краями и полиэтиленовые люверсы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Шейный спондилит.
- Заболевания шейных дисков.
- Шейная радикулопатия.
- Шейная невралгия.
- Остеопороз.
- Тортиколлис.
- Растяжение шеи / ригидность шеи
- Продолжительное использование, особенно у пожилых людей (модель B07).
- Профилактическое применение, включая длительные поездки (модель B07).
- Ранние стадии ревматоидной болезни шейного отдела позвоночника.
- Хлыстовые травмы
- Трещины, травмы и вывихи
- Острая травма шейного отдела позвоночника
- Апноэ во сне

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная PU-пена создает надежную поддержку.
- Оптимальная ширина обеспечивает полное покрытие шеи.
- Анатомичный дизайн создает удобное место для подбородка.
- Мягкий хлопковый чехол обеспечивает вентиляцию.
- Конструкция с обертыванием облегчает надевание.
- Застежки с крючками и петлями обеспечивают плотное прилегание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная поддержка.
- Значительная иммобилизация.
- Комфортная амортизация.
- Полное покрытие шеи.
- PU-пена высокой плотности.
- Оптимальная ширина.
- Дышащий тканевый чехол.
- Анатомичный дизайн.
- Застежки-липучки.

СОСТАВ

- Модель В02: Полиуретан, Полиамид, Полиэтилен, Полипропилен, Хлопок
- Модель В07: Полиуретан, Спандекс, Хлопок, Полиамид

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки.
2. Оберните воротник вокруг шеи так, чтобы подбородок располагался в углублении.
3. Застегните застежки-липучки, обеспечив плотное и надежное прилегание.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India