

Бандаж коленный функциональный

Бандаж коленный функциональный Тупог научно разработан для обеспечения поддержки и стабильности колена. Боковые жесткие шарниры обеспечивают боковую устойчивость, повторяя естественные движения коленного сустава.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж коленный функциональный Тупог изготовлен из прочного эластичного материала, который фиксируется застежками-липучками. Изделие оснащено двухосевыми алюминиевыми шарнирами. Имеет дополнительные верхние и нижние ремни с передним отверстием для коленной чашечки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Послеоперационное лечение и реабилитация
- Травмы связок: передняя крестовидная (ACL), медиальная коллатеральная (MCL), задняя крестовидная (PCL), латеральная коллатеральная (LCL)
- Разрыв мениска
- Гипермобильность
- Хронический остеоартрит
- Ослабление/повреждения коленного сустава
- Реабилитация после перелома

ОСОБЕННОСТИ

- Жёсткие элементы для обеспечения стабильности и поддержки
- Двухосевые шарниры для сохранения естественного движения коленного сустава
- Анатомическая форма, точно повторяющая анатомию колена
- Отверстие для коленной чашечки, исключая давление на неё
- Эластичная основа для обеспечения оптимальной компрессии
- Обёртывающая конструкция для комфортного использования
- Верхние и нижние ремни для дополнительной компрессии и фиксации
- Открытая задняя часть предотвращает образование складок
- Силиконовая полоса для предотвращения скольжения на коже

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабилизация и поддержка
- Индивидуальная компрессия
- Легкость в использовании
- Жёсткие двухосевые шарниры
- Обёртывающая конструкция
- Отверстие для коленной чашечки
- Силиконовая полоса для предотвращения скольжения
- Верхний и нижний ремни для дополнительной фиксации
- Система фиксации UBL (система липучек)
- Открытая задняя часть для повышения комфорта

СОСТАВ

Хлопок, Полиамид, Полиэстер, Полипропилен, Алюминий

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните все застёжки-липучки.
2. Оберните бандаж вокруг колена так, чтобы обе петли находились по бокам. Совместите середину шарнира с центром коленного сустава.
3. Закрепите верхние и нижние части застёжками-липучками для комфортной компрессии. Убедитесь, что отверстие для коленной чашечки расположено правильно.
4. Закрепите верхние и нижние ремни для дополнительной фиксации и компрессии.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига, 40, офис 25/3
220004 г. Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India

