

Бандаж для колена

Бандаж для колена Tynor предназначен для облегчения боли в колене путем мягкого давления на область под коленной чашечкой. Это снижает нагрузку и помогает уменьшить болевые ощущения за счет изменения распределения сил по коленному суставу.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж для колена **Tynor** изготовлен из полиэстера и ламинированного полиуретанового материала с внутренней мягкой отделкой из спандекса. Изделие оснащено анатомической гелевой подушкой и застежкой-липучкой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пателлярный тендинит
- Пателлофemorальный болевой синдром (хондромалиция)
- Синдром колена бегуна
- Нарушение трекинга надколенника
- Болезнь Осгуда-Шлаттера
- Артрит
- Постоперационная поддержка колена

ОСОБЕННОСТИ

- Анатомическая форма поддерживает и поднимает надколенник
- Силиконовая подкладка поглощает вибрации и удары
- Узелковая поверхность оказывает массажное действие
- Мягкий спандекс обеспечивает максимальный комфорт для кожи
- Обратная пряжка позволяет регулировать степень фиксации
- Застежка-липучка гарантирует плотную посадку
- Элегантный дизайн — подходит для ношения под одеждой

РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Убедитесь, что поддержка сидит плотно, обеспечивая надежную фиксацию без ограничения кровообращения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная поддержка
- Удобная амортизация
- Облегчение болевых ощущений
- Анатомическая форма
- Силиконовая подкладка с узелковой текстурой
- Мягкий спандекс
- Обратная пряжка для настройки компрессии

СОСТАВ

Нейлон, Спандекс, Силикон, EVA, Полиэстер

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки.
2. Разместите поддерживающий элемент наколенника непосредственно ниже надколенника, на патellarном сухожилии. Отрегулируйте анатомическую гелевую подушку.
3. Пропустите ремень с липучкой через механизм обратной пряжки.
4. Закрепите ремни с липучками для надежной и комфортной фиксации.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига, 40, офис 25/3
220004 г. Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India