

Бандаж на голеностопный сустав Comfeel (пара)

Бандаж на голеностопный сустав Comfeel Tynor (бандаж повышенной комфортности) – это эстетично выполненное изделие, специально созданное для обеспечения компрессии и поддержки голеностопного сустава. Оно улучшает кровообращение, оказывает согревающее воздействие, способствующее уменьшению боли и воспаления.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж на голеностопный сустав Comfeel изготовлен с использованием передовой технологии жаккардового вязания с применением комбинации нейлона и спандекса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нестабильность голеностопного сустава
- Растяжение связок голеностопа
- Перенапряжение голеностопного сустава
- Повторяющиеся травмы голеностопа
- Подвертывание стопы
- Восстановление после операций
- Психологическая поддержка пожилых пациентов
- Артрит голеностопного сустава

ОСОБЕННОСТИ

- Научно обоснованный дизайн обеспечивает оптимальную компрессию
- Воздухопроницаемая вязка гарантирует хорошую вентиляцию
- Эластичный спандекс обеспечивает плотное прилегание
- Эстетичный дизайн для улучшенного внешнего вида
- Гипоаллергенный нейлон для максимального комфорта
- Мягкая зона в области пятки снижает давление
- Тонкий материал позволяет носить изделие с обувью

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Сохранение тепла
- Мягкий и гипоаллергенный материал
- Воздухопроницаемая вязка
- Эластичная ткань
- Мягкая зона в области пятки
- Удобный дизайн для легкого надевания
- Эстетичный внешний вид

СОСТАВ

Нейлон, Спандекс

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят

- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Наденьте изделие, как носок, потянув его вверх, при этом более длинная и широкая часть должна располагаться сверху.
- Совместите мягкую полосатую область пятки с пяткой.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India