

Бандаж на голеностопный сустав эластичный

Бандаж на голеностопный сустав эластичный Тупог предназначен для обеспечения комфортной компрессии и стабилизации голеностопного сустава, предотвращая травмы. Этот эластичный бандаж подходит для различных видов спорта и активного образа жизни.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж на голеностопный сустав эластичный Тупог изготовлен из высококачественных материалов, таких как эластан, нейлон и полиэстер, которые обеспечивают оптимальную компрессию и поддержку. Изделие оснащено удобной застежкой-липучкой для легкости использования и надежной фиксации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нестабильность голеностопного сустава
- Профилактика растяжений и вывихов
- Предотвращение повторных травм голеностопа
- Подвертывание стопы
- Восстановление после операций

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный бандаж обеспечивает индивидуальную компрессию
- Петля для голеностопа облегчает надевание и снятие
- Дышащий материал обеспечивает оптимальный комфорт
- Застежки-липучки обеспечивают плотную и надежную фиксацию
- Прочность и долговечность в эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индивидуальная компрессия
- Простота в использовании
- Улучшенная стабильность голеностопа
- Легкость и воздухопроницаемость
- Петля для голеностопа
- Высокая эластичность
- Обёртывающая конструкция

СОСТАВ

Эластан, Полиэстер, Нейлон, Полиуретан

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежку-липучку и разверните изделие.
2. Вставьте стопу в петлю для голеностопа.
3. Оберните эластичную ленту вокруг голеностопа восьмеркой, двигаясь к задней части стопы.
4. Закрепите застежку-липучку для надежной и плотной фиксации.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г. Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India