

Бандаж для колена неопреновый

Бандаж для колена неопреновый Тупор предназначен для обеспечения компрессии и поддержки коленного сустава. Изделие способствует снижению боли и воспаления за счёт согревающего эффекта.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж для колена неопреновый Тупор изготовлен из высококачественной трёхслойной ткани на основе неопрена и нейлона. Оснащён удобной тройной системой застежек-липучек, что обеспечивающей надёжную фиксацию изделия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Растяжения и повреждения связок коленного сустава
- Начальная стадия остеоартроза коленного сустава
- Спортивные травмы
- Реабилитация после операций на коленном суставе
- Вывихи надколенника
- Тендинит связки надколенника (пателлярный тендинит)
- Хондромалиция надколенника

ОСОБЕННОСТИ

- Неопрен обеспечивает терапевтическое тепло и надёжную поддержку
- Эластичный материал создает оптимальную компрессию
- Анатомическое отверстие для надколенника поддерживает и разгружает коленную чашечку
- Фиксация с помощью застежек застежки-липучки UBL обеспечивает плотное и комфортное прилегание
- Обёртывающая конструкция изделия позволяет легко надевать и снимать его

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Поддержка надколенника
- Сохранение тепла
- Неопреновый материал
- Анатомическое отверстие для надколенника
- Удобная обхватывающая модель
- Надёжная фиксация с застежки-липучки UBL

СОСТАВ

Полиамид, Неопрен

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжки-липучки.
2. Наденьте наколенник на коленный сустав, убедившись, что вырез для надколенника точно совпадает с его положением.
3. Застегните среднюю застёжку-липучку.
4. Затем застегните верхнюю и нижнюю застёжки, обеспечив комфортную, но эффективную компрессию.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига, 40, офис 25/3
220004 г. Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India