

Корсет контурный для пояснично-крестцового отдела базовый

Корсет контурный для пояснично-крестцового отдела базовый Tynor разработан для поддержки и иммобилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника и коррекции осевых деформаций с целью облегчения болевого синдрома в пояснице. Анатомически точные шины обеспечивают надежную фиксацию в анатомически правильном и комфортном положении.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет контурный для пояснично-крестцового отдела базовый Tynor изготовлен из сверхпрочного ортопедического эластичного материала, содержащего термостойкую резиину с высоким модулем упругости. Застежки-липучки обеспечивают легкость надевания и снятия корсета, а также возможность быстрой регулировки. Жесткие, предварительно сформированные металлические шины, встроенные в заднюю панель, обеспечивают надежную фиксацию в анатомически правильном и удобном положении. Механизм с двойным натяжением с обратной пряжкой позволяет достичь дополнительной компрессии и надежной фиксации пояснично-крестцового отдела.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поясничный спондилит
- Болезни межпозвоночных дисков
- Послеоперационный уход после дискэктомии
- Боли в пояснице, усталость, постуральные деформации и механические нагрузки, вызванные неправильной осанкой
- Остеопорозная боль в поясничном отделе позвоночника
- Обеспечение комфорта при длительном сидячем положении или путешествиях
- Стабилизация при переломах и травмах позвоночника
- Дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника
- Ослабленные мышцы живота

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкая настройка размеров
- Механизм с двойным натяжением
- Хорошо амортизирующая задняя панель
- Предконтурные шины

СОСТАВ

Стальная пружина, Полиэстер, Хлопок, Ethafoam, Полиамид, Каучук.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.

- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Оберните корсет вокруг талии, при этом необходимо держать его в вертикальном положении.

Обратите внимание на метку "up inside". Задняя панель должна располагаться по центру позвоночного столба. Нижний край корсета должен совпадать с краем позвоночника.

Закрепите застежки-липучки до комфортной степени компрессии. Потяните и закрепите двойной ремень с помощью механизма обратной пряжки для дополнительной компрессии и надежной фиксации пояснично-крестцового отдела.

РАЗМЕРЫ / ДЮЙМЫ / САНТИМЕТРЫ

- S: 28 до 34 / 70 до 85
 - M: 34 до 40 / 85 до 100
 - L: 40 до 46 / 100 до 115
 - XL: 46 до 52 / 115 до 130
- Измерьте окружность талии.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь: ЧТУП «Нэйчерал Блис» Улица Немига ,40, офис 25/3 220004 г.Минск Республика Беларусь info@dinamed.by	Производитель: Tynor Orthotics Private Limited Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial Area, Mohali-160055, Punjab, India Производственная площадка: Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS Nagar Mohali – 160055, Punjab, India
--	--