

Корсет для пояснично-крестцового отдела базовый

Корсет для пояснично-крестцового отдела базовый Тупор разработан с использованием гибких спинальных шин, что обеспечивает комфортную поддержку и иммобилизацию спины, а также облегчает болевой синдром в нижней части спины. Комфортная иммобилизация позволяет носить пояс повседневно.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет для пояснично-крестцового отдела базовый изготовлен из сверхпрочной высокопористой ортопедической эластичной ткани с добавлением термостойкой резины с высоким модулем упругости. Застежки-липучки обеспечивают удобную и быструю фиксацию корсета на талии, а также легкость в использовании и снятии. Твердые, но гибкие нейлоновые пластины и полипропиленовая лента в задней части изделия обеспечивают необходимую жесткость для надежной иммобилизации пояснично-крестцовой области. Гибкие шины принимают форму позвоночника при ношении и фиксируют спину в нужном положении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Спондилит
- Болезни межпозвоночных дисков
- Послеоперационный уход после дискэктомии
- Боли в нижней части спины, усталость, постуральные деформации и механические нагрузки из-за неправильной осанки
- Остеопоротическая боль в поясничном отделе позвоночника
- Для комфорта при длительной работе и путешествиях
- Плацебо-эффект способствует самостоятельному соблюдению рекомендаций врача
- Стабилизация при переломах позвонков и травмах
- Временная иммобилизация при извлечении и транспортировке пострадавших

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечность
- Дополнительный комфорт
- Гибкие спинальные шины
- Хорошая иммобилизация

СОСТАВ

Полиэстер, Каучук, Полипропилен, Хлопок, Полиамид.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.

- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Оберните корсет вокруг талии согласно метке «up inside». Центральная поддерживающая панель должна располагаться вдоль позвоночного столба. Нижний край корсета должен совпадать с краем позвоночника. Закрепите липучки и отрегулируйте уровень компрессии, подгоняя корсет под комфортное положение. Затем закрепите двойную эластичную ленту для дополнительной фиксации и усиления жесткости шин.

РАЗМЕР / ДЮЙМЫ / САНТИМЕТРЫ

- S: 28–34 / 70–85
- M: 34–40 / 85–100
- L: 40–46 / 100–115
- XL: 46–52 / 115–130

Измерьте окружность вокруг пупка.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India