

Бандаж абдоминальный базовый

Бандаж абдоминальный базовый Тупог предназначен для поддержки и компрессии области живота. Он используется для уменьшения объема талии, как послеоперационный пояс или пояс после родов.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж абдоминальный базовый Тупог изготовлен из особо прочного ортопедического эластичного материала, содержащего термостойкую резину с высоким модулем упругости. Застежки-липучки обеспечивают идеальную посадку пояса на талии, контролируемую компрессию, а также легкость и быстроту в использовании и снятии. Гибкие ленты из полиамида предотвращают образование складок, не скатываются и не скручиваются.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Послеоперационный уход за грудной клеткой и животом.
- Помогает пациентам легче и без боли отхаркивать мокроту после операций на животе и груди.
- Снижает дискомфорт, связанный с резким расширением грудной клетки при глубоких вдохах, кашле или чихании в период восстановления.
- Защищает и фиксирует хирургические швы на животе и груди.
- Используется как пояс для уменьшения объема живота.
- При пупочной и вентральной грыже.
- Для женщин после родов, чтобы укрепить ослабленные мышцы живота.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечность
- Дополнительный комфорт
- Идеальная эластичность
- Не скручивается, не образует складок

СОСТАВ

Полиэстер, Каучук, Полипропилен, Хлопок, Полиамид.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Оберните бандаж вокруг талии согласно метке «up inside», начиная от верхней части позвоночника. Закрепите застежку-липучку для создания комфортной компрессии.

РАЗМЕР / ДЮЙМЫ / САНТИМЕТРЫ

- S: 28–34 дюйма / 70–85 см
- M: 34–40 дюймов / 85–100 см
- L: 40–46 дюймов / 100–115 см
- XL: 46–52 дюйма / 115–130 см

Измеряйте окружность вокруг пупка.

Фактический цвет изделия может отличаться от изображённого на фото.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India